


WIP'ANIOS Excel

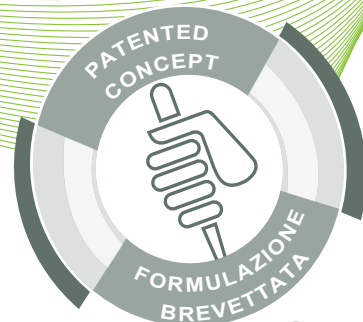

- **Salviette in viscosa 100% biodegradabili**
- **Soluzione impregnante formulata senza profumo e senza alcol**
- **Ampio spettro virucida**
- **Efficacia antimicrobica a partire da 3 minuti**

INDICAZIONI

Trattamento di dispositivi medici non immergibili e non invasivi*. Asciugatura delle guaine degli endoscopi durante il trattamento preliminare, prima dell'immersione per la pulizia e la disinfezione.

* Esempi: sonde ecografiche classiche, sensori di pressione, tester glicemia, tensiometri, martelletti per riflessi...

CARATTERISTICHE

- Composizione: 100% viscosa (spunlace 50gr/m²)
- Dimensione della salvietta: 180 x 200 mm
- Soluzione impregnante: 5 ml di SURFA'SAFE PREMIUM per singola salvietta

COMPOSIZIONE

Salviette impregnate di una soluzione detergente e disinfettante: Cloruro di didecildimetilammonio (n° CAS 7173-51-5: 3 mg/g), tensioattivi non ionici, agente sequestrante, eccipienti.

SALVIETTA
MONOUSO




WIP'ANIOS Excel


MODALITÀ D'USO



Prendere una salvietta e richiudere bene la bobina.

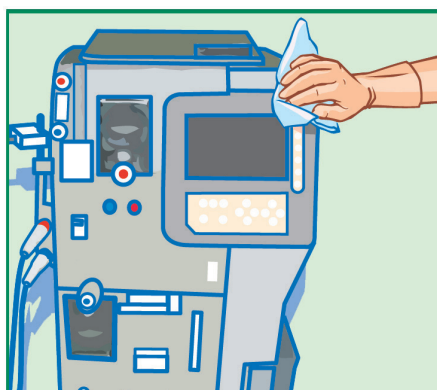

Utilizzare la salvietta sulla zona da trattare. Usare una seconda salvietta se necessario. Rispettare il tempo di contatto indicato per l'attività antimicrobica desiderata.

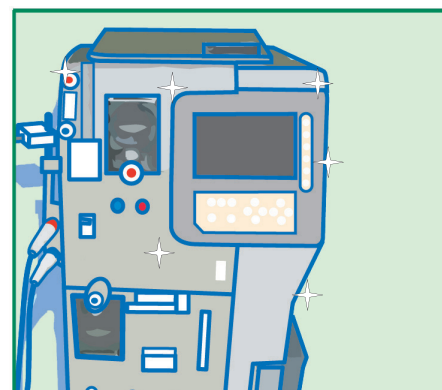

Lasciare asciugare. Non occorre risciacquare tranne per le zone da trattare a contatto con la pelle, le mucose o gli alimenti. Chiudere bene la confezione dopo ogni apertura.

Nota: WIP'ANIOS EXCEL non sostituisce la fase di pulizia-disinfezione per immersione, se questa è possibile.

PROPRIETÀ MICROBIOLOGICHE

La soluzione impregnante è :

Attivo su	Norme	Tempo di contatto
Batteri	EN 1040, EN 13727, EN 13697, EN 14561	3 minuti
	EN 13727 su ERV, A. baumannii β LSE, E. coli OXA 48, E. cloacae OXA 48, K. pneumoniae OXA 48, SARM	1 minuti
	EN 13697 su ERV, A. baumannii β LSE, E. coli OXA 48, E. cloacae OXA 48, SARM	2 minuti
Lieviti	EN 1275, EN 13624, EN 13697, EN 14562	5 minuti
Muffe	EN 1275, EN 13624, EN 13697, EN 14562	20 minuti
Virus	Rotavirus, PRV (virus del tipo Epatite B), HSV-1, Vaccinia virus, BVDV (virus del tipo Epatite C)	1 minuti
	Polyomavirus SV40	5 minuti
	Norovirus Murin	30 minuti

PRECAUZIONI D'USO

Pericoloso - rispettare le istruzioni per l'uso (Stabilite secondo le norme europee in vigore in materia di classificazione ed etichettatura dei prodotti chimici).

Conservare tra +5°C e +35°C.

Dispositivo medico di Classe IIb (Direttiva 93/42/CEE modificata).

CONFEZIONI

6 confezioni da 100 salviette.....Rif. 2446.655
12 confezioni da 50 salviette.....Rif. 2446.424

