



SCHEMA PRODOTTO
MASCHERINA CHIRURGICA MONOUSO
A TRE STRATI IN TNT



GDA MASK 01 **CE**

DISPOSITIVO MEDICO **BFE: >99%**
UNI EN 14683 TIPO II

DESCRIZIONE GENERALE

Mascherina chirurgica monouso a tre strati, in tessuto non tessuto TNT in Polipropilene opaco, inodore, con filtro ad elevata efficienza, morbida, priva di fibra di vetro, ipoallergenico, buona permeabilità all'aria. Si fissa con elastici privi di lattice. Rifiniture termosaldate.

NORMATIVE DI RIFERIMENTO

Direttiva Dispositivi Medici 93/42 e smi recepite in Italia da DLgs. 46/97 e smi
UNI EN 14683:2019
ISO 10993-1:2010

NOMENCLATURA

COD. ARTICOLO	CND	N. REPERTORIO
GDA MASK 01	T020601	1962459

ISTRUZIONI PER CONSERVAZIONE E MAGAZZINO

Immagazzinare in luogo fresco e asciutto. Non conservare a temperature superiori a 40°C. Non esporre a luce solare diretta, luce UV e lampade fluorescenti. Se il confezionamento è danneggiato o bagnato scartare il prodotto. Non utilizzare oltre la data di scadenza indicata sulla confezione.

VITA UTILE DEL PRODOTTO

5 anni

Il prodotto è LATEX FREE

CONFEZIONE

Cartone da 1.500 pezzi, dispenser da 50 pezzi.

COLORE (in base a disponibilità della materia prima)

BIANCO, VERDE, AZZURRO: colorazione antiriflesso e stabile

DIMENSIONI

MISURA	UNICA
Lunghezza	mm 175 ± 2
Larghezza	mm 95 ± 2
Lunghezza minima elastici	mm 175 ± 5
Fermanaso in alluminio rivestito in PVC - lunghezza	mm 105±3
Fermanaso in alluminio rivestito in PVC - larghezza	mm 3.5±0.5
Fermanaso rivestito in PVC - diametro	mm 0.68

GDA srl

S.P. 362 km 15,700 - Galatina - (LE) - 73013 - Italy
Tel : 0836 562531 - 0836 569443
Fax: 0836 631418
gruppogda.it / info@gruppogda.it
P.iva: 04179290756



www.gruppogda.it
info@gruppogda.it



SPECIFICHE TECNICHE

Descrizione	Pezzi	Materiale	Normativa di riferimento	Tolleranza su peso	Caratteristiche
Fermanaso	1	Alluminio rivestito in PP/PE per garantire la massima sicurezza	EN 14683		Modellabile
Strato interno	1	TNT 100%PP 25 gr/mq	EN 14683	± 2%	Traspirante, soffice, ipoallergenico, resistente. Privo di resine, collanti e fibre di vetro
Filtro intermedio	1	MELT BLOWN 100% PP 30 gr/m2	EN 14683	± 2%	EN 14683 classe II
Strato esterno	1	TNT 100%PP 25 gr/mq	EN 14683	± 2%	Traspirante, soffice, ipoallergenico, resistente. Privo di resine, collanti e fibre di vetro
Elastici	2	Poliestere rivestito di filato di nylon			Morbido, ipoallergenico, privo di lattice
Cuciture		Termosaldatura ad ultrasuoni			Ipoallergenico

PROPRIETA' CHIMICO-FISICHE FONDAMENTALI DEL POLIPROPILENE IMPIEGATO PER LA FABBRICAZIONE DELLO STRATO INTERMEDIO

Aspetto	Tessuto non tessuto
Colore	Neutro - Bianco a traslucente
Odore	Nessuno
Infiammabilità (solidi – gas)	Brucia ma non si accende facilmente
Proprietà ossidanti	Non considerato un agente ossidante
Temperatura di autoaccensione	>300°C
Punto / intervallo di fusione	50 - 170°C
Densità	<1 gr/c3
Insolubilità	Insolubile

GDA srl

S.P. 362 km 15,700 - Galatina - (LE) - 73013 - Italy
 Tel : 0836 562531 - 0836 569443
 Fax: 0836 631418
gruppogda.it / info@gruppogda.it
 P.iva: 04179290756



www.gruppogda.it
info@gruppogda.it

m.STP.01 rev 0



PROCESSO DI PRODUZIONE

- 1- Le materie prime, composte da tessuto non tessuto, una volta effettuati i controlli qualitativi, vengono assemblate, piegate e termosaldate ad ultrasuoni, inserendo all'interno il fermanaso. Il taglio avviene con macchine automatiche.
- 2- I due elastici sono termosaldati sui due lati;
- 3- I prodotti finiti sono controllati, contati e confezionati in un dispenser da 50 pezzi
- 4- 30 dispenser di 50 pezzi ciascuno sono imballati in un cartone cm 60x40x50
- 5- Dopo il controllo finale di qualità, la merce è pronta per la spedizione

MODALITA' DI TRATTAMENTO DEI RIFIUTI

Prodotto: considerare il riciclaggio, non gettare residui nelle fognature. Smaltire secondo le normative vigenti locali.

ISTRUZIONI D'USO

- Coprire la bocca naso e mento e passare gli elastici dietro le orecchie
- Premere la linguetta metallica per fare aderire la maschera al naso
- Rimuovere la maschera usata prendendola solo dagli elastici
- Per una protezione efficace cambiare spesso la maschera, se sporca o se bagnata
- Buttare nell'apposito cestino la maschera usata e lavare le mani accuratamente con acqua e sapone

**MASCHERINA
CHIRURGICA
MONOUSO**

GDA MASK 01

LOT 2020-001



2020-06



2025-06



9 504845 315790



PRODOTTO DA: GDA s.r.l.

S.P. 362 km 15 700 - Galatina (LE) - 73013 - Italy
e-mail: info@gruppogda.it - www.gruppogda.it

**DISPOSITIVO MEDICO
UNI EN 14683 TIPO II**



GDA srl

S.P. 362 km 15,700 - Galatina - (LE) - 73013 - Italy
Tel: 0836 562531 - 0836 569443
Fax: 0836 631418
gruppogda.it / info@gruppogda.it
P.iva: 04179290756



www.gruppogda.it
info@gruppogda.it

m.STP.01 rev 0